
 RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN ALAT DEFIBRILATOR		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 072/Yanmed/2022	No. Revisi 00	Halaman : 1 / 2
	Tanggal Terbit : 01 November 2022	Ditetapkan, PIL. DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  <u>dr. IRA AJENG ASTRIED</u> Pembina TK.I / IVb NIP. 19770520 200501 2 013	
	PENGERTIAN	Alat yang digunakan untuk memberikan terapi energi listrik dengan dosis tertentu ke jantung pasien melalui elektroda (pedal) yang ditempatkan di permukaan dinding dada pasien. Defibrilator dapat digunakan untuk defibrilasi dan kardioversi.	
TUJUAN	1. Mengembalikan irama jantung ke irama sinus dari irama VT (Ventrikular Takikardia dan Ventrikular Vibrilasi) 2. Untuk sinkronisasi irama jantung		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor: 188.4/114.a/KEP/RSUDP/2022 tentang Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
PROSEDUR	1. Siapkan defibrilator yang telah dihubungkan dengan stop kontak listrik. 2. Nyalakan defibrilator dengan menekan tombol " ON". 3. Hubungkan tiga elektroda dengan kabel eletroda. 4. Tentukan energi yang diperlukan dengan cara menekan tombol pengatur energi. 5. Paddle diberi jelly secukupnya. 6. Letakkan paddle dengan posisi paddle apex diletakkan pada apeks jantung (sebelah kiri papilla mammae di garis mid axilaris atau spasi intercosta ke		



RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN ALAT DEFIBRILATOR

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman :
072/Yanmed/2022	00	2 / 2

- 5-6 mid axial kiri) dan paddle sternum diletakkan pada garis sternal kanan di bawah klavikula.
7. Isi (*Charge*) energi, tunggu sampai energi terisi penuh, Tunggu sampai indikator energi penuh dan alarm berbunyi.
8. Jika energi sudah penuh, beri aba-aba dengan suara keras dan jelas agar tidak ada lagi anggota tim yang masih ada kontak dengan pasien atau korban, termasuk juga yang operator defibrilator, sebagai contoh:
- "DC siap "
- "Saya *Clear*"
- "Anda *Clear*"
- "Semua *Clear*"
9. Kaji ulang gambaran ECG pada layar monitor, tekan tombol "*dischage*" pada kedua paddle sambil menekan kedua paddle.
10. Kaji ulang gambaran ECG pada layar monitor apakah diperlukan untuk defibrilasi/ kardioversi ulang.
11. Bila sudah selesai digunakan tekan tombol "OFF" bersihkan paddle dari sisa jelly dan simpan pada tempatnya, lepaskan kabel dari stop kontak listrik.
12. Bereskan dan bersihkan kembali alat dan simpan pada tempatnya.

UNIT TERKAIT

Seluruh unit perawatan yang terdapat alat defibrilator

DOKUMEN TERKAIT

1. Form Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT)
2. Form Rekam Medis Aktivasi Code Blue